

LEA RECTANGLES GAME® Guide

Numer części: 254600



Gra LEA RECTANGLES GAME® składa się z dwóch grup czarnych i szarych prostokątów. Całkowita powierzchnia każdego prostokąta jest taka sama. Ten zestaw prostokątów jest modyfikacją prostokątów Effrona i został zaprojektowany, aby umożliwić obserwację zdolności dziecka do dostrzegania różnic w wielkości. Aby uczynić sytuację testową przyjazną dla dzieci, test przeprowadza się tak, jakbyśmy bawili się klockami.

Dziecko z prawidłowym wzrokiem potrafi wskazać, który z dwóch prostokątów jest dłuższy, a który krótszy, często jeszcze przed ukończeniem trzech lat, tak jak dziewczynka na obrazku obok. Jeśli jest to trudne lub dziecko nie rozumie, o co chodzi, można skorzystać z gry „Prostokąty” LEA®, aby sprawdzić, czy dziecko ma konkretną wadę wzroku.

Pokaż dziecku najdłuższy i najkrótszy prostokąt i poproś je, aby pomacało je za pomocą bodźców dotykowych. Wyjaśnij, że ten, który dziecko może dotknąć na zewnątrz, drugi nazywamy dłuższym, a drugi krótszym. Jeśli dziecko nauczy się pojęć „dłuższy” i „krótszy” za pomocą bodźców dotykowych, oznacza to, że rozumie podstawowe pojęcia. Jeśli dziecko nawet wtedy nie będzie w stanie wizualnie rozpoznać, który z prostokątów jest dłuższy, możesz przetestować go dalej, używając wszystkich prostokątów.

Przewodnik

Nauczył mnie tej gry pewien chłopiec, po tym jak przeprowadziłem z nim test w swój zwykły sposób. Powiedział mi: „Lea, jeśli badasz dziecko, które nie jest tak inteligentne jak ja, możesz przeprowadzić ten test w ten sposób:”

- Połóż czarne prostokąty na stole tak, aby utworzyć schody.
- Umieść szare prostokąty na stole wokół schodów, nie w tej samej kolejności, w jakiej znajdują się na schodach.
- Poproś dziecko, aby umieściło szare prostokąty na czarnych prostokątach tak, aby każdy z nich znalazł się na czarnym prostokącie o tej samej długości.
- Następnie widzisz, jak szuka szarego prostokąta, jak go chwyta i jak umieszcza na czarnym prostokącie. Czy trafia na właściwy, czy nie. To zdjęcie zostało zrobione, aby wyjaśnić nową technikę testowania.



Ten bystry chłopiec z ciężkim porażeniem mózgowym zrozumiał, co do niego powiedziałem, podczas naszej zabawy. Chcemy sprawdzić, jak łatwo dziecku jest dostrzec, które prostokąty są tej samej długości (zadanie czysto wzrokowe w strumieniu brzuszny) i jak dokładna jest odległość między palcem wskazującym a kciukiem podczas chwywania prostokąta (zadanie wzrokowo-ruchowe w strumieniu grzbietowym).

Jeżeli dziecko nie postrzega długości wzrokowo, dopasowuje prostokąt dotykiem do kilku innych prostokątów, aby znaleźć ten właściwy.

Jeśli dziecko ma trudności z planowaniem wielkości chwytu przez ciemieniową część ciała, ruchy dłoni są niezdarne. Możesz to sprawdzić osobno, demonstrując dziecku, jak powoli i ostrożnie chwyta prostokąt, dotykając go końcami dłuższej osi. Połóż prostokąt na dłoni i poproś dziecko, aby chwyciło go delikatnie i ostrożnie.

Jeśli u dziecka występują pierwotne problemy motoryczne, funkcję ręki obserwuje fizjoterapeuta dziecka, który może lepiej ocenić ograniczenia funkcji motorycznych ręki dziecka.

Dziecko chwytające prostokąt ma przed dotknięciem go odpowiedni odstęp między palcami, tzn. musi mieć zapewniony odpowiedni wzrokowy nadzór nad ruchami dłoni.

Ograniczono uszkodzenia różnych funkcji korowych. U dziecka może wystąpić utrata jednej z dwóch dość podobnych funkcji, ponieważ są one zlokalizowane w różnych obszarach kory wzrokowej.

LEA RECTANGLES GAME® Guide

Numer części: 254600



1155 Jansen Farm Drive
Elgin, IL 60123 USA

Toll Free: 800-362-3860 Phone: 847-841-1145

Toll Free Fax: 888-362-2576 Fax: 847-841-1149

www.good-lite.com




Good-Lite B.V.
Kantstraat 19, NL-5076NP Haaren
P.O. Box 10110, NL-5060 GA Oisterwijk
The Netherlands
EAB@medical-risk.com
+31 (0) 411.623791
SRN: NL-AR-000002695



QNET Ltd.
Livingstone House, 309 Harrow Road
Wembley, Middlesex HA9 6BD (GB)
UKRP@medical-risk.com
MHRA Account No: 0000011991



QNET CH-REP GmbH
Im Büel 15
8750 Glarus (Switzerland)
CH-REP@medical-risk.com
UID Number: CH-313.448.831
Ph.: +41 79 630 0870

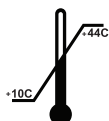

Date of issue: 15.08.2025

Revision: 0.01

MD LEA® RECTANGLES GAME

REF 254600