


LEA SYMBOLS® Chart for Vision Rehabilitation

Numer części: 258000

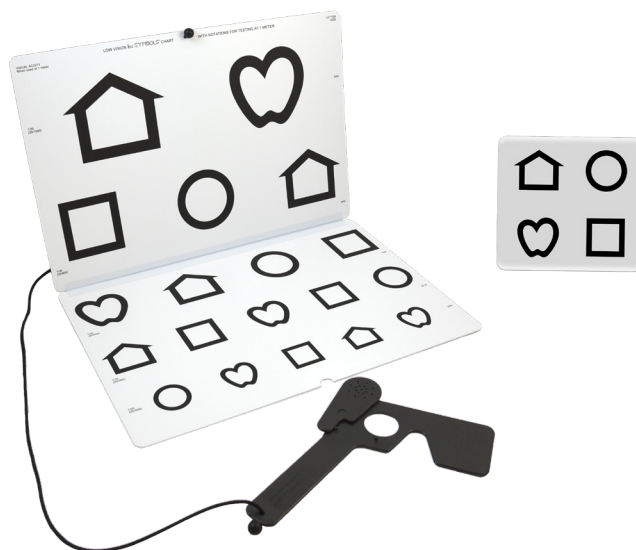

Tablica Colenbrander LEA SYMBOLS® do badania wzroku dla osób słabowidzących (nr 258000) jest przeznaczona do badania dzieci i dorosłych z poważnymi wadami wzroku. Największe symbole mają rozmiar 50 milionów, co odpowiada 1/50 (20/1000, 6/300, 0,02), a najmniejsze symbole mają rozmiar 1 miliona, co odpowiada 1/1 (20/20, 6/6, 1,0) w odległości jednego metra. Test jest dostarczany z metrowym sznurkiem, który pozwala zachować odpowiednią odległość podczas badania.

Procedura testowa

- Badając małe dzieci, po badaniu odległości pokaż im tabelę odległości, mówiąc: „Spójrzmy na te same obrazki z nieco dalszej odległości”.
- Podczas badania dwuocznego należy wskazywać pierwszy symbol w każdym wierszu w kolejności malejącej.
- Przesuwaj się w dół, aż dziecko zacznie się wahać lub błędnie rozpozna symbol.
- Wróć o jedną linię wyżej i poproś dziecko o wskazanie wszystkich symboli na tej linii.
- Jeśli dziecko rozpozna wszystkie symbole prawidłowo, przejdź do następnego wiersza z mniejszymi symbolami i poproś dziecko o rozpoznanie wszystkich symboli w tym wierszu.
- Jeżeli dziecko pominie jakiś symbol, poproś je, aby spróbowało ponownie, wskazując krótko ten symbol.
- Dziecko mające problemy z fiksacją wzroku może pomijać symbole w obrębie szeregu symboli.
- Ostrość wzroku rejestruje się w ostatnim wierszu, w którym co najmniej 3 z 5 symboli są poprawnie zidentyfikowane. Wartość ostrości wzroku znajduje się na marginesie obok tego wiersza.
- Po uzyskaniu dobrych wyników w badaniu obuocznym, należy zbadać każde oko osobno.
- Podczas badania jednoocznego należy posłużyć się pierwszym symbolem każdej linii lub co drugą linią dla jednego oka i ostatnim symbolem każdej linii dla drugiego oka, aby określić, od której linii rozpocząć badanie blisko wartości progowej.
- Jeśli dziecko ma głęboką wadę wzroku, najniższe rzędy testu można wykorzystać jako test widzenia bliży. Odległość 25 cm jest najpraktyczniejsza, ponieważ obliczenie wartości ostrości wzroku jest proste. Stanowią one ¼ wartości wydrukowanej obok ostatniej odczytanej linijki. (Aby obliczyć ¼ wartości Snellena, należy pomnożyć mianownik przez 4).

LEA SYMBOLS® Chart for Vision Rehabilitation

Numer części: 258000



1155 Jansen Farm Drive
Elgin, IL 60123 USA

Toll Free: 800-362-3860 Phone: 847-841-1145

Toll Free Fax: 888-362-2576 Fax: 847-841-1149

www.good-lite.com




Good-Lite B.V.
Kantstraat 19, NL-5076NP Haaren
P.O. Box 10110, NL-5060 GA Oosterwijk
The Netherlands
EAB@medical-risk.com
+31 (0) 411 623791
SRN: NL-AR-000002695



QNET Ltd.
Livingstone House, 309 Harrow Road
Wembley, Middlesex HA9 6BD (GB)
UKRP@medical-risk.com
MHRA Account No: 0000011991



QNET CH-REP GmbH
Im Büel 15
8750 Glarus (Switzerland)
CH-REP@medical-risk.com
UID Number: CH-313.448.833
Ph.: +41 79 610 0870

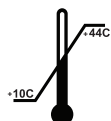

Date of issue: 12.08.2025

Revision: 0.01



LEA SYMBOLS® Chart for Vision Rehabilitation



258000