

LEA NUMBERS® Chart for Vision Rehabilitation

Numer części: 272100



Test LEA NUMBERS® dla osób słabowidzących (nr 272100) jest przeznaczony do badania dzieci i dorosłych z poważnymi wadami wzroku. Największe optotypy mają rozmiar 50M, co odpowiada 1/50 (20/1000, 6/300, 0,02), a najmniejsze optotypy mają rozmiar 1M, co odpowiada 1/1 (20/20, 6/6, 1,0) w odległości jednego metra. Test jest dostarczany z metrowym sznurkiem, który pozwala zachować odpowiednią odległość podczas badania.

Procedura testowa

- Rozpocznij testowanie obuoczne. Wskazuj na pierwszy symbol w każdym wierszu w kolejności malejącej.
- Przesuwaj się w dół, aż dziecko/osoba zawaha się lub błędnie rozpozna symbol.
- Wróć o jedną linię wyżej i poproś dziecko/osobę o wskazanie wszystkich symboli znajdujących się na tej linii.
- Jeśli dziecko/osoba prawidłowo rozpozna wszystkie symbole, przejdź do następnego wiersza z mniejszymi symbolami i poproś dziecko o rozpoznanie wszystkich symboli w tym wierszu.
- Jeżeli dziecko/osoba pominie jakiś symbol, poproś ją/jego o ponowną próbę, wskazując krótko ten symbol.
- Dziecko/osoba mająca problemy z fiksacją może pomijać symbole w obrębie szeregu symboli.
- Ostrość wzroku rejestruje się w ostatnim wierszu, w którym co najmniej 3 z 5 symboli są poprawnie zidentyfikowane. Wartość ostrości wzroku znajduje się na marginesie obok tego wiersza.
- Po uzyskaniu dobrych wyników w badaniu obuocznym, należy zbadać każde oko osobno.
- Podczas badania jednoocznego należy posłużyć się pierwszym symbolem każdej linii lub co drugą linią dla jednego oka i ostatnim symbolem każdej linii dla drugiego oka, aby określić, od której linii rozpocząć badanie blisko wartości progowej.
- Jeśli klient ma głęboką wadę wzroku, najniższe rzędy testu można wykorzystać jako test widzenia bliży. Odległość 25 cm jest najpraktyczniejsza, ponieważ obliczenie wartości ostrości wzroku jest proste. Stanowią one ¼ wartości wydrukowanej obok ostatniej odczytanej linii. (Aby obliczyć ¼ wartości Snellena, należy pomnożyć mianownik przez 4).

Jednostka M, jednostka metryczna – odległość w metrach, z której optotyp odniesienia C jest widoczny pod kątem widzenia 5°

LEA NUMBERS® Chart for Vision Rehabilitation

Numer części: 272100



1155 Jansen Farm Drive
Elgin, IL 60123 USA

Toll Free: 800-362-3860 Phone: 847-841-1145

Toll Free Fax: 888-362-2576 Fax: 847-841-1149

www.good-lite.com




Good-Lite B.V.
Kantstraat 19, NL-5076NP Haaren
P.O. Box 10110, NL-5060 GA Oosterwijk
The Netherlands
EAB@medical-risk.com
+31 (0) 411 623791
SRN: NL-AR-000002695



QNET Ltd.
Livingstone House, 309 Harrow Road
Wembley, Middlesex HA9 6BD (GB)
UKRP@medical-risk.com
MHRA Account No: 0000011991



QNET CH-REP GmbH
Im Büel 15
8750 Glarus (Switzerland)
CH-REP@medical-risk.com
UID Number: CH-313.448.831
Ph.: +41 79 610 0870

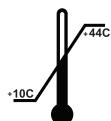

Date of issue: 12.08.2025

Revision: 0.01



LEA NUMBERS® Chart for Vision Rehabilitation



272100