


Floor Stand with Casters for ESV3000™, ESC2000™ and CSV1000™

Numer części: 500004

Podstawa ESV3000™, CSV1000™ lub
ESC2000™ z kółkami

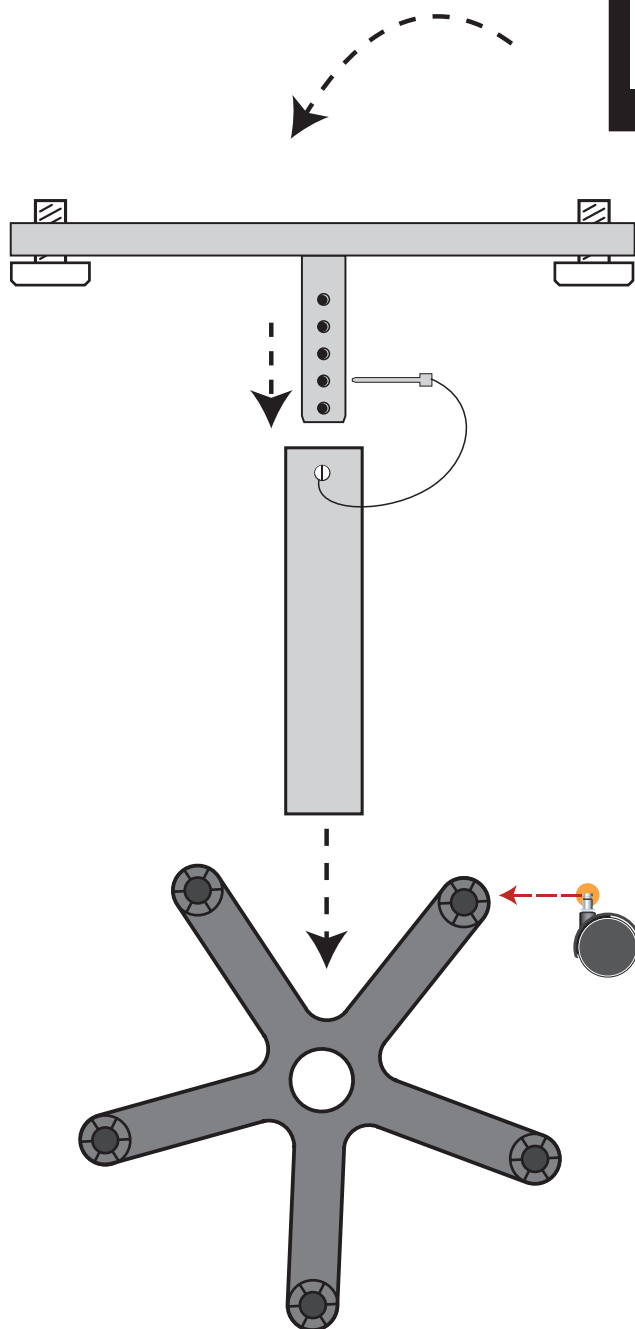

x4

W systemie ESC2000™ wykorzystywane są te 2 otwory



Modele ESV3000™ i CSV1000™ wykorzystują te 4 otwory



1. Włóż kółka (5) do pięcionożnej podstawy.
2. Włóż kwadratowy drążek do podstawy i przykręć śrubę od spodu podstawy, aby zapewnić solidne połączenie.
3. Odwróć obudowę iluminatora do góry nogami, aby odsłonić 2 (lub 4) otwory montażowe.
4. Umieść drążek T na obudowie, dopasowując odpowiednie otwory montażowe do oświetlacza. Dokręć mocno każdą śrubę z każdej strony.
5. Podnieś obudowę i przymocowany do niej drążek w kształcie litery T, obróć obudowę oświetlacza prawą stroną do góry i wprowadź okrągły drążek do kwadratowego drążka.
6. Włóż szpilkę do okrągłego słupka na żadaną wysokość. Upewnij się, że uchwyt szpilek został włożony przez oba otwory w słupku typu T.

Floor Stand with Casters for ESV3000™, ESC2000™ and CSV1000™

Numer części: 500004



1155 Jansen Farm Drive
Elgin, IL 60123 USA

Toll Free: 800-362-3860 Phone: 847-841-1145

Toll Free Fax: 888-362-2576 Fax: 847-841-1149

www.good-lite.com




Good-Lite B.V.
Kantstraat 19, NL-5076NP Haaren
P.O. Box 10110, NL-5060 GA Oisterwijk
The Netherlands
ES&B@medical-risk.com
+31 (0) 411.623.791
SRN: NL-AR-000002695



QNET Ltd.
Livingstone House, 309 Harrow Road
Wembley, Middlesex HA9 6BD (GB)
UKRP@medical-risk.com
MHRA Account No: 0000011991



QNET CH-REP GmbH
Im Büel 15
8750 Glarus (Switzerland)
CH-REP@medical-risk.com
UID Number: CHE-313.448.831
Ph.: +41 79 610 0870

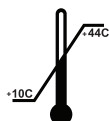

Date of issue: 13.08.2025

Revision: 0.01

MD Floor Stand with Casters for ESV3000™, ESC2000™ and CSV1000™

REF 500004