

Optokinetic (OKN) Flags & Banners

Numer części: 547400, 607700, 588600



547400 - Czerwono-biała flaga OKN



607700 - Czarno-biała flaga OKN



588600 - Czerwono-biały baner OKN

Flaga OKN (optokinetyczna) służy do indukowania oczopląsu, czyli regularnego, powtarzalnego, mimowolnego ruchu gałki ocznej, którego kierunek, amplituda i częstotliwość są zmienne. Oczopląs może być indukowany, nabyty lub wrodzony. Charakteryzuje się on jednym z dwóch typów: oczopląsem z fazą wolną i szybką, definiowanym konwencjonalnie przez orientację fazy szybkiej. Nazywa się to „oczopląsem szarpiącym” i zazwyczaj wynika z defektu motorycznego.

Drugi typ charakteryzuje się ruchami o tej samej prędkości w każdym kierunku i nazywany jest oczopląsem wahadłowym. Zwykle jest on wynikiem słabego widzenia centralnego.

W niektórych przypadkach mamy do czynienia z mieszanką obu typów.

Flaga OKN wywołą oczopląs, jeśli zdolność rozdzielcza oka jest wystarczająca, aby rozróżnić paski. Badany siada przed flagą OKN (lub bębniem), a flaga jest przesuwana poziomo w polu widzenia. Oczy reagują powolnym ruchem pasków (0,2 sekundy) i szybkim ruchem pasków (0,1 sekundy) w przeciwnym kierunku. Wywołanie OKN świadczy o widzeniu. Niektórzy specjaliści radzą badanemu, aby spróbował „policzyć czerwone paski”.

Należy pamiętać, że wprowadzony symulant może stłumić oczopląs, „wpatrując się” przez flagę lub bęben. W przypadku podejrzenia można zastosować alternatywny test, zwany testem „wahającego się lustra”.

Optokinetic (OKN) Flags & Banners

Numer części: 547400, 607700, 588600



1155 Jansen Farm Drive
Elgin, IL 60123 USA

Toll Free: 800-362-3860 Phone: 847-841-1145

Toll Free Fax: 888-362-2576 Fax: 847-841-1149

www.good-lite.com




Good-Lite B.V.
Kantstraat 19, NL-5076NP Haaren
P.O. Box 10110, NL-5060 GA Oosterwijk
The Netherlands
EAB@medical-risk.com
+31 (0) 411 623791
SRN: NL-AR-000002695



QNET Ltd.
Livingstone House, 309 Harrow Road
Wembley, Middlesex HA9 6BD (GB)
UKRP@medical-risk.com
MHRA Account No: 0000011991



QNET CH-REP GmbH
Im Büel 15
8750 Glarus (Switzerland)
CH-REP@medical-risk.com
UID Number: CH-313.448.831
Ph.: +41 79 610 0870

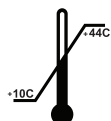

Date of issue: 15.08.2025

Revision: 0.01

MD Optokinetic Flags - Red & White

REF 547400

MD Black/White OKN Flag

REF 607700

MD Optokinetic Banner - Red

REF 588600