


Expanded Amsler Chart Set

Numer części: 730026

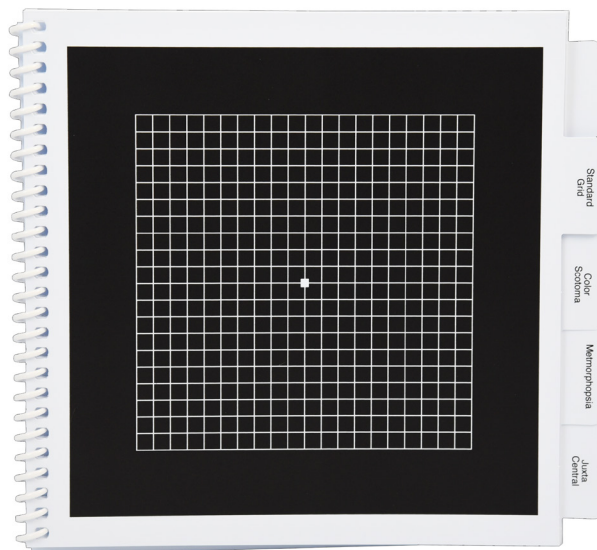

Wykres	Nazwa	Nazwa alternatywna
1	Standard	Amsler Chart
2	Central	Scotoma Diagonal
3	Color Scotoma	Red on Black
4	No lines	Dots
5	Metamorphopsia	Parallel Lines on Black
6	Metamorphopsia Reading	Added Central Lines
7	Juxta-central	Standard with Small Squares

- Podawać jednoocześnie z odległości 28–30 cm (11–12 cali)
- Oprawa spiralna umożliwia całkowite złożenie zawartości w celu zaprezentowania każdej siatki z minimalnym rozproszeniem uwagi

Siatka Amslera jest najbardziej użyteczna w ocenie dysfunkcji dołka środkowego lub paradołka. Pomaga zidentyfikować zniekształcenia wzrokowe (metamorfopsje) w obrębie centralnych 20° pola widzenia, spowodowane fizycznym zniekształceniem powierzchni siatkówki. Badanie to wykrywa również mroczki centralne spowodowane chorobą nerwu wzrokowego lub plamki żółtej.

Odległość w teście Amsler Grid wynosi 28–30 cm (11–11,8 cala). Warunkiem wstępnym jest określenie odpowiedniej ostrości wzroku. Należy upewnić się, że siatka Amslera jest równomiernie oświetlona. Należy unikać sztucznego rozszerzenia źrenicy (mydriasis) lub oftalmoskopii bezpośrednio przed prezentacją siatek. Badanie należy wykonać jednoocześnie, z pacjentem noszącym korekcję blizy. Należy odradzać stosowanie soczewek progresywnych. Zaleca się, aby osoba przeprowadzająca badanie znajdowała się naprzeciwko pacjenta, aby umożliwić ciągle monitorowanie ruchów jego oczu. Pomocne może być ostrzeżenie pacjenta, że badanie to zajmuje trochę czasu i wymaga szczególnej uwagi.

Daj pacjentowi ołówek i kopię arkusza punktacji Amsler Grid i poproś go,

aby na podstawie arkusza odpowiedział na poniższe pytania. Zaczynając od Standard Grid, zapytaj pacjenta: „Czy widzisz środkową białą kropkę?” (Jeśli nie, użyj tabeli „Central Scotoma”). „Wciąż skupiając się na tej kropce, widzisz cztery rogi?” Następnie: „Zwróć uwagę na linie. Czy w którejs z nich brakuje fragmentów? Czy w którejs z nich są dziury? Jeśli tak, to gdzie? Wskaż „gdzie” na arkuszu punktacji”.

Po przypomnieniu pacjentowi o skupieniu się na centralnym punkcie, zapytaj: „Czy wszystkie linie są proste? Czy któraś jest pofalowana, a jeśli tak, proszę pokazać mi to na arkuszu oceny”. Następnie zapytaj: „Czy wszystkie małe kwadraty są tej samej wielkości? Jeśli niektóre są większe lub mniejsze, to które?”

Powtórz te pytania, mając zasłonięte drugie oko.

Pozostałe siatki Amslera w tym zestawie dostarczają narzędzi do dalszej analizy.

Siatka mroczka centralnego jest stosowana w przypadkach, gdy punkt centralny nie jest widoczny. Poleć pacjentowi, aby użył linii ukośnych do fiksacji wzroku, tak jakby punkt centralny był widoczny, a następnie powtórz te same pytania, jeśli to konieczne.

Siatka mroczków kolorowych jest przeznaczona specjalnie do wykrywania mroczków kolorowych.

Siatka Amslera bez linii uwidacznia wyłącznie mroczki, bez linii lub kwadratów, które mogłyby zniekształcić obraz.

Siatka linii równoległych metamorfopsji to nieco uproszczona wersja dla pacjentów mających trudności z siatką kwadratów. Należy ją najpierw przedstawić poziomo, a następnie pionowo.

Siatka do czytania Metamorphopsia zawiera dodatkowe linie w obszarze centralnym, służące do czytania.

Siatka Juxta Central Grid umożliwia dokładniejsze badanie zakłóceń w centralnym obszarze prostokątnym. Każdy z mniejszych kwadratów odpowiada w przybliżeniu 1/2 stopnia. Większe kwadraty reprezentują 1 stopień.

Expanded Amsler Chart Set

Numer części: 730026



1155 Jansen Farm Drive
Elgin, IL 60123 USA

Toll Free: 800-362-3860 Phone: 847-841-1145

Toll Free Fax: 888-362-2576 Fax: 847-841-1149

www.good-lite.com




Good-Lite B.V.
Kantstraat 19, NL-5076NP Haaren
P.O. Box 10110, NL-5060 GA Oisterwijk
The Netherlands
EU@medical-risk.com
+31 (0) 411.623.791
SRN: NL-AR-000002695



QNET Ltd.
Livingstone House, 309 Harrow Road
Wembley, Middlesex HA9 6BD (GB)
UK@medical-risk.com
MHRA Account No: 0000011991



QNET CH-REP GmbH
Im Büel 15
8750 Glarus (Switzerland)
CH-REP@medical-risk.com
UID Number: CHE-313.448.831
Ph.: +41 79 610 0870

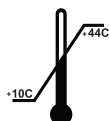

Date of issue: 18.08.2025

Revision: 0.01

MD Expanded Amsler Chart Set

REF 730026