

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
TONOJET L900  
JEDNORAZOWY PRYZMAT DO TONOMETRU APLANACYJNEGO**


Urządzenie to zostało zaprojektowane i sprzedawane jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Jakikolwiek przetwórstwo lub ponowna sterylizacja nie jest dopuszczalna. Skutki każdego nieautoryzowanego przerobu lub ponownej sterylizacji może spowodować następujące powikłania:

- skażenie nieefektywnego przerobu lub ponownej sterylizacji.
- szkody wyrządzone ze względu na skutki przeprowadzonej metody przerobu lub ponownej sterylizacji.


**Po jednorazowym użyciu, urządzenie powinno być natychmiast usuwane w sposób kontrolowany jako odpad medyczny.**

**Sposób użycia jednorazowego pryzmatu do tonometru TONOJET L900**

1. Sprawdzić, czy opakowanie nie zostało wcześniej otwarte. Otworzyć ostrożnie sakiewkę odrywając oba brzegi opakowania.
2. Trzymać pryzmat przez opakowanie podczas oddzielania woreczka w celu uniknięcia skażenia powierzchni.

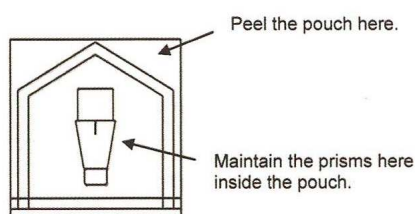

3. Umieścić pryzmat zgodnie z znakiem (znak kreski – pozwala na dokładne pozycjonowanie na uchwycie), wyrównać znak na pryzmacie ze znakiem na uchwycie.

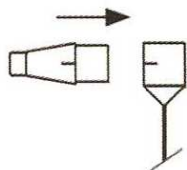

4. Tonometr jest gotowy do użycia.
5. Wyrzucić po użyciu.

**UWAGA !!!**

**Natężenie wiązki światła lampy szczelinowej powinno być usytuowane pod kątem od 10 do 15 stopni od osi optycznej.**

**Nie używać w przypadku uszkodzenia sterylnej opakowania.**

WYTWÓRCA:

**LUNEAU SAS**

1. Avenue de Malaguet  
28360 Prunay le Gillon-France  
Tel.: +33 (0)2 37 25 25 25  
Fax: +33 (0)2 37 25 75 99  
e-mail: info@luneau.fr

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

**Mana Medical Sp z o.o.**

ul. Okrężna 19, Magdalenka  
05-506 Lesznowola  
NIP: 739-12-77-966  
Biuro handlowe:  
ul. Piechoty Łanowej 46  
tel. 606-412-302

Références/Article No /Articolo Codice No.:

Boîte de 100 pièces/Box of 100 pieces/Scatola 100 pezzi: 14.71.24



Produit conforme à la directive 93/42/CEE.  
Product conforming to the 93/42/EEC directive.  
Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CE